


Easy Chin Med – Windows 7 Installationshilfe

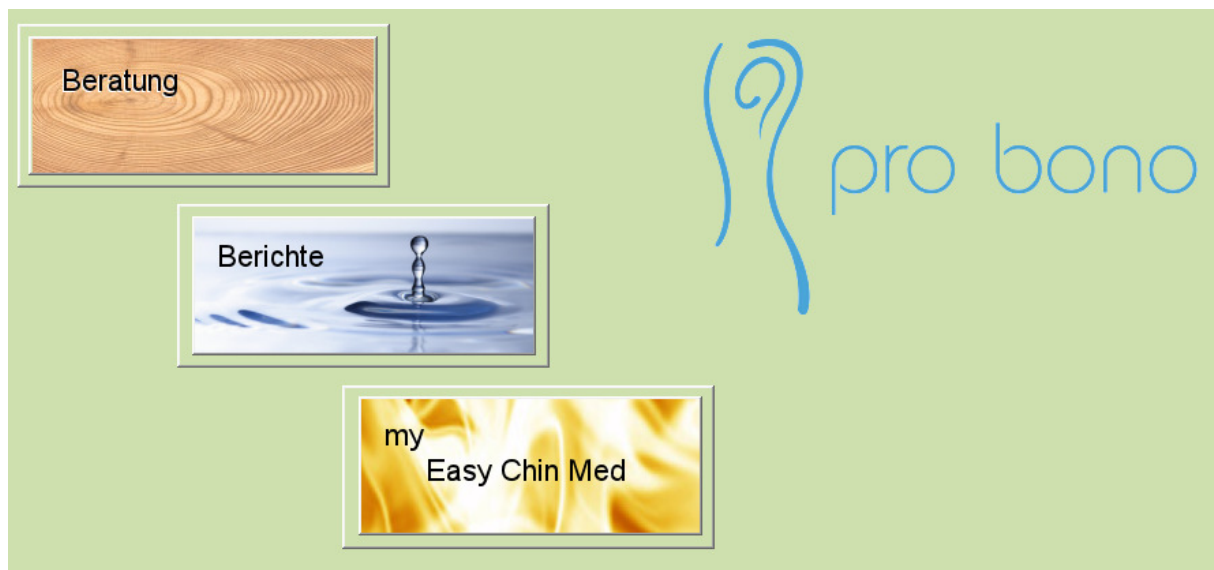


Dieses Dokument unterstützt Sie bei der Installation der Easy Chin Med Software unter Windows 7.


Für eine reibungslose Installation der Easy Chin Med Software, gehen Sie folgende Schritte durch:

1) Laden Sie die Software von der Homepage herunter:

http://www.probono.at/files/ecm_demo.zip

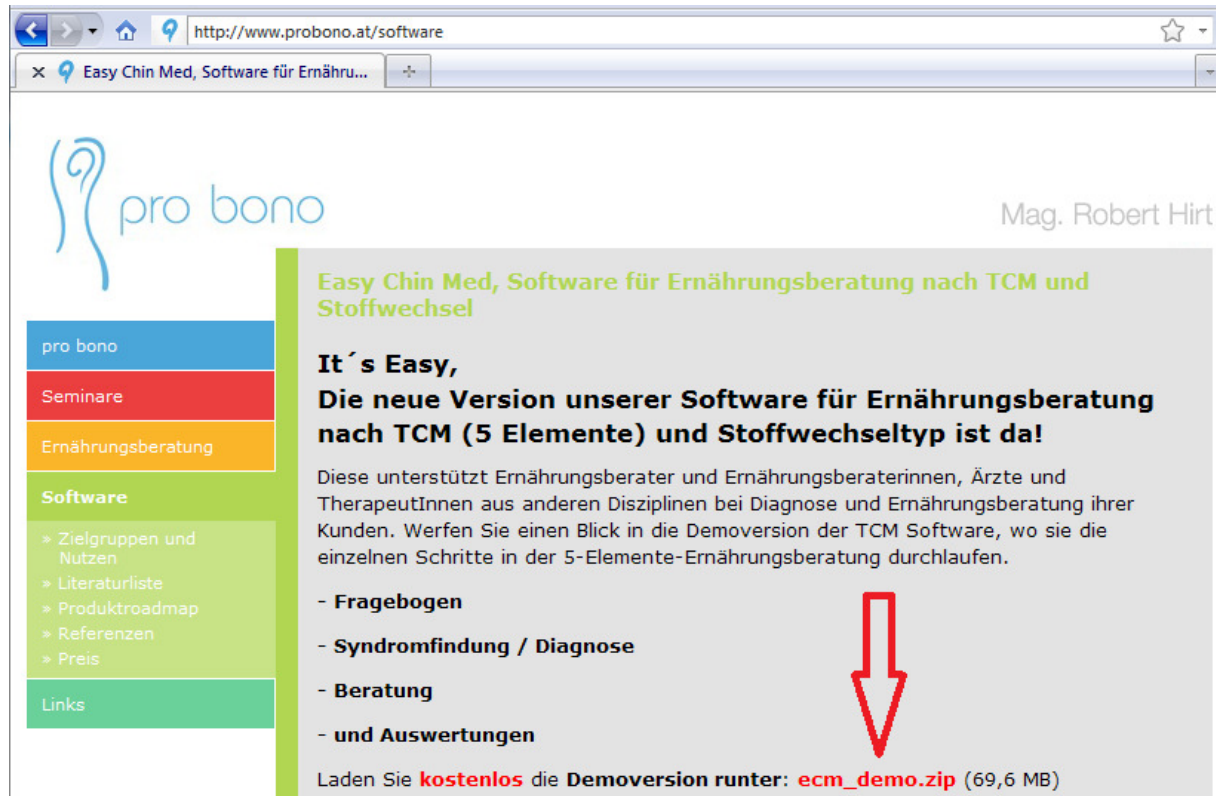


Entpacken Sie die heruntergeladene Datei auf Ihrem Desktop:

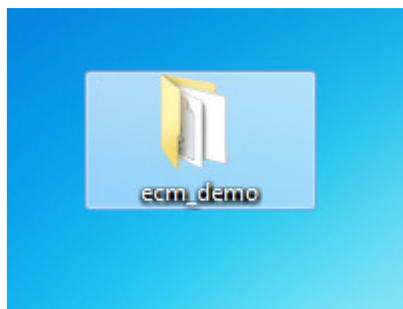


Machen Sie den Ordner mit einem Doppelklick auf:

2) Jetzt klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die „setup“-Datei und wählen aus dem Kontextmenü die Option „Als Administrator ausführen“ aus:

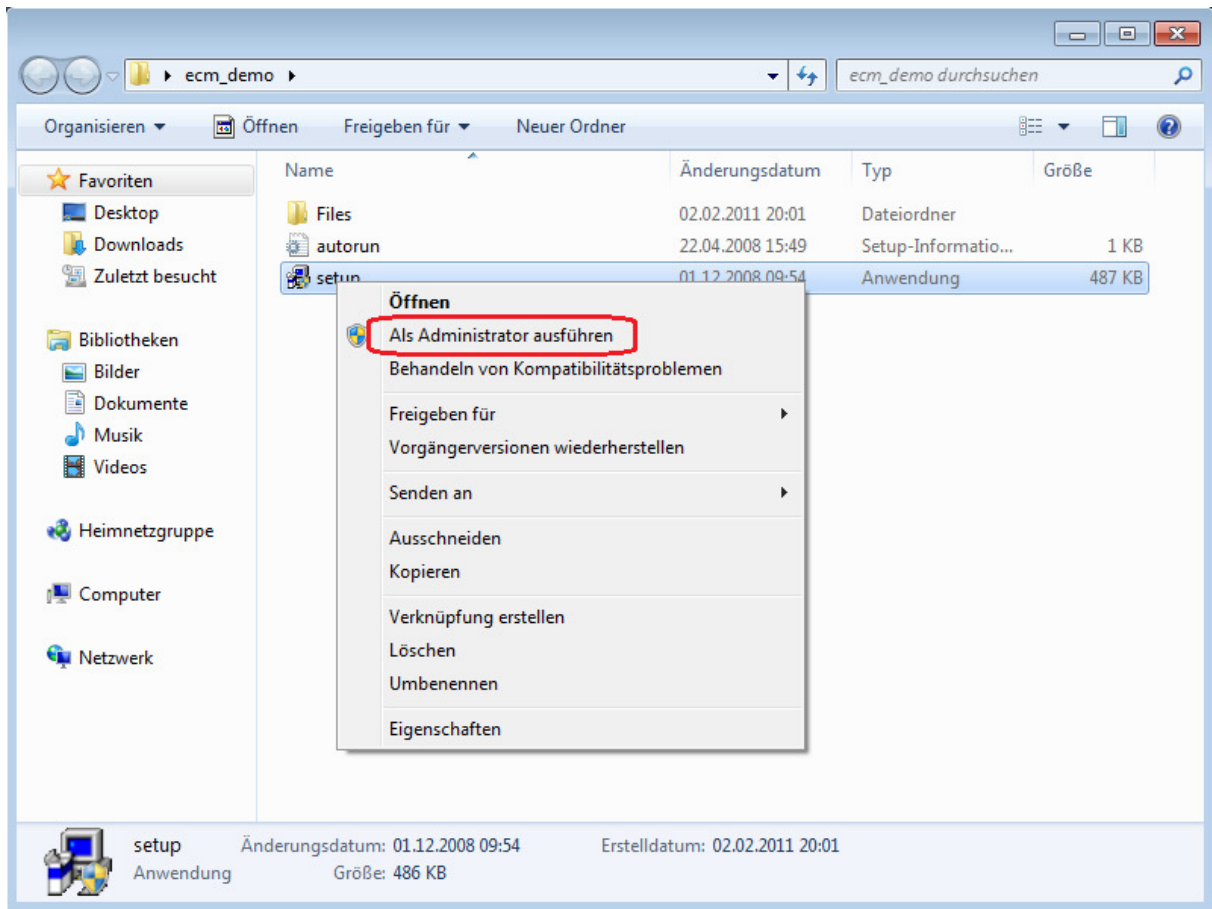

2a) Falls folgende Meldung kommen soll:

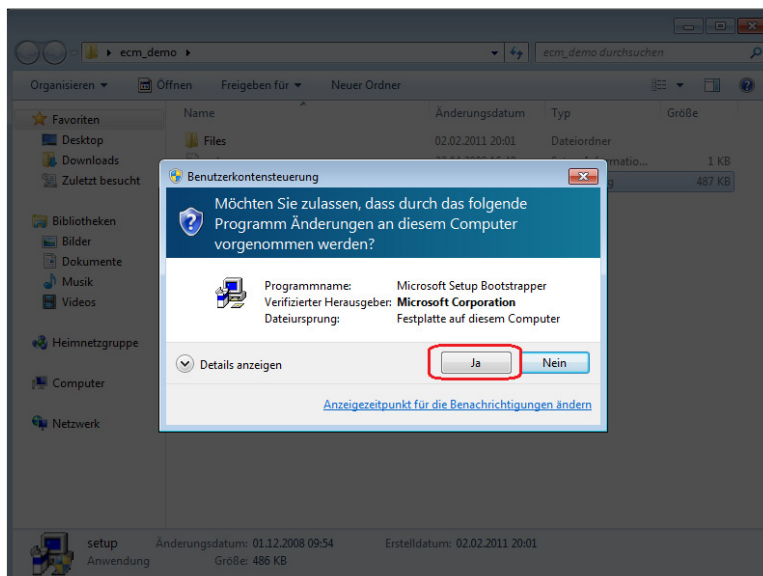


einfach mit „Ja“ die Installation der Software fortsetzen.


3) Ab jetzt einfach die Installationsschritte - wie im Dokument beschrieben - folgen:




4)

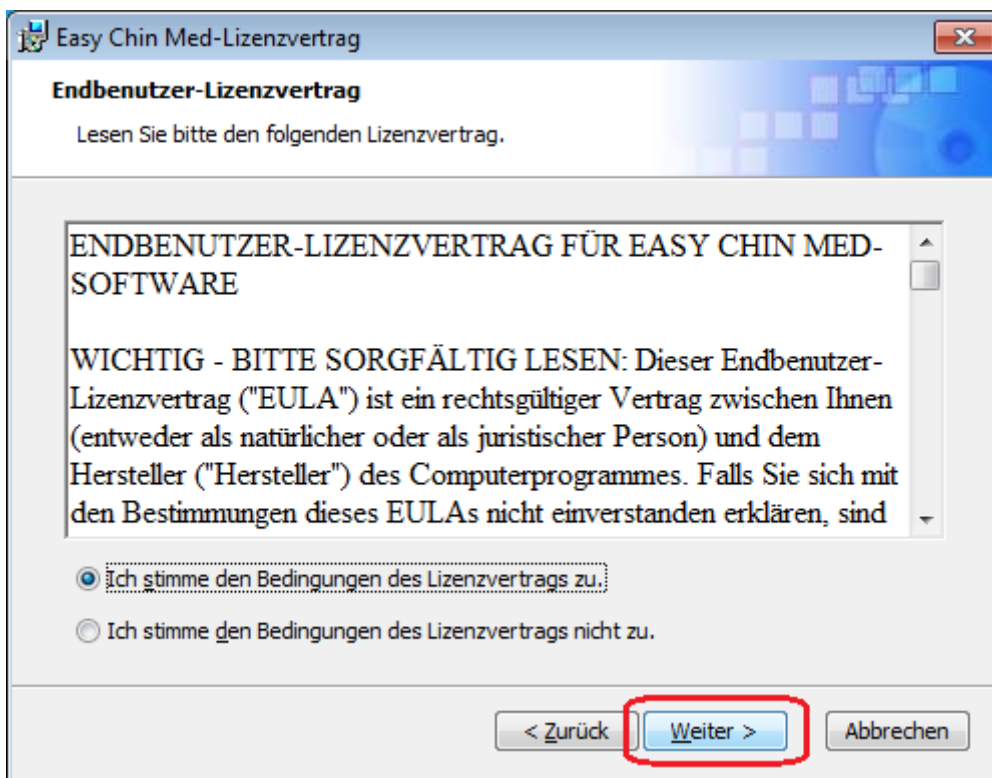


5)

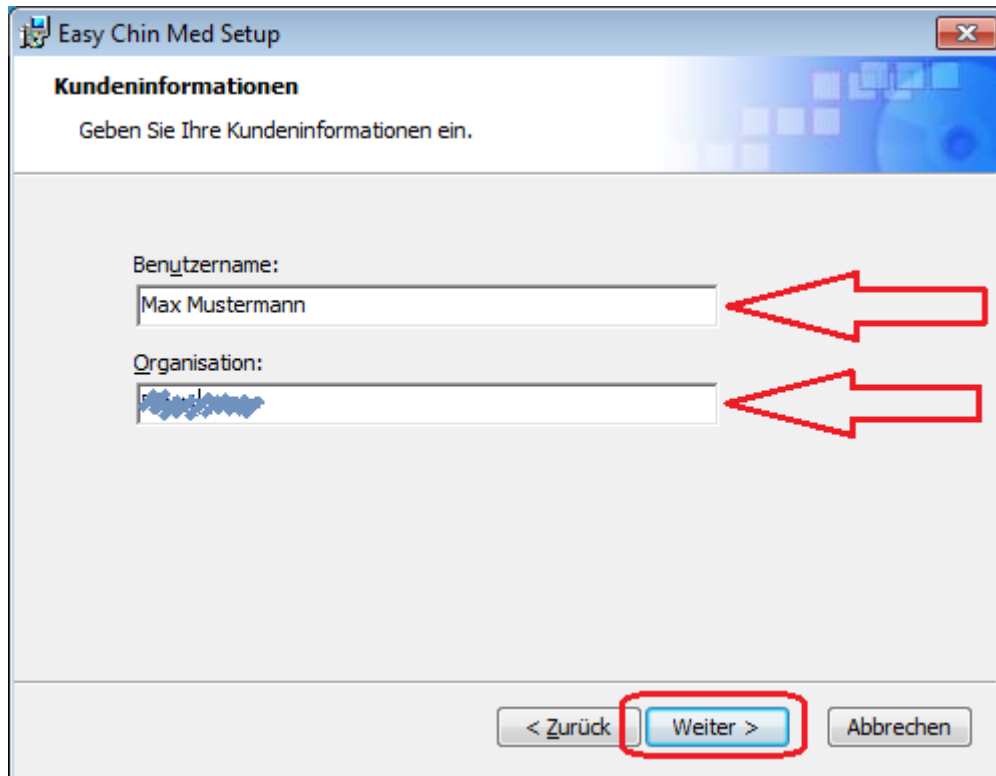


6)

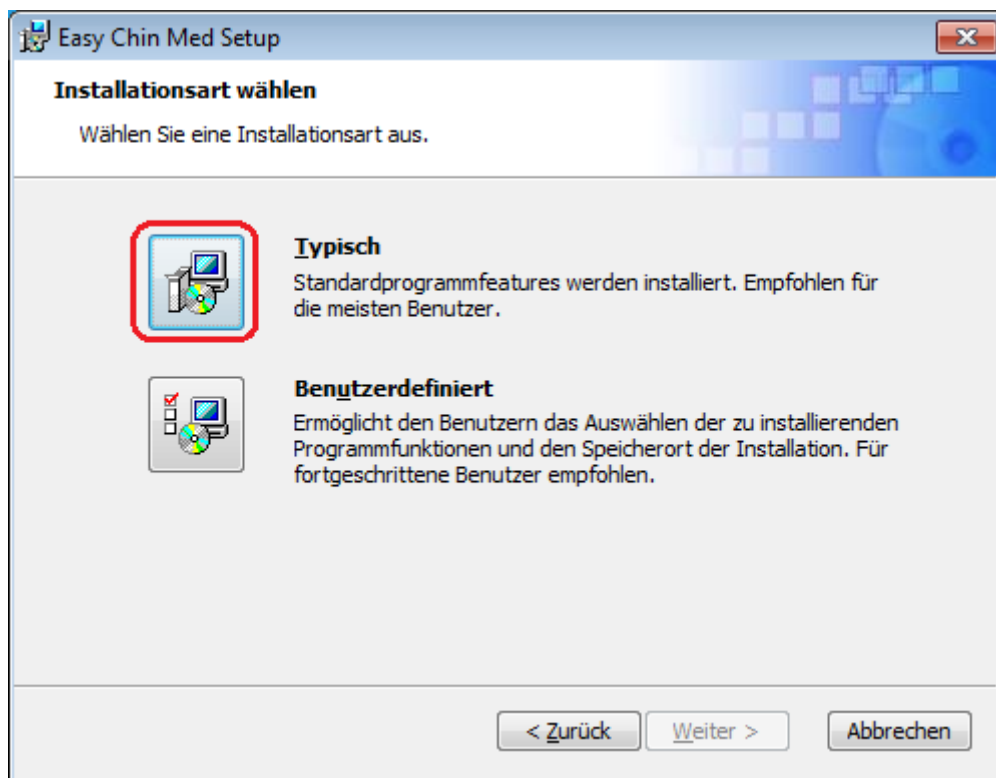



7)

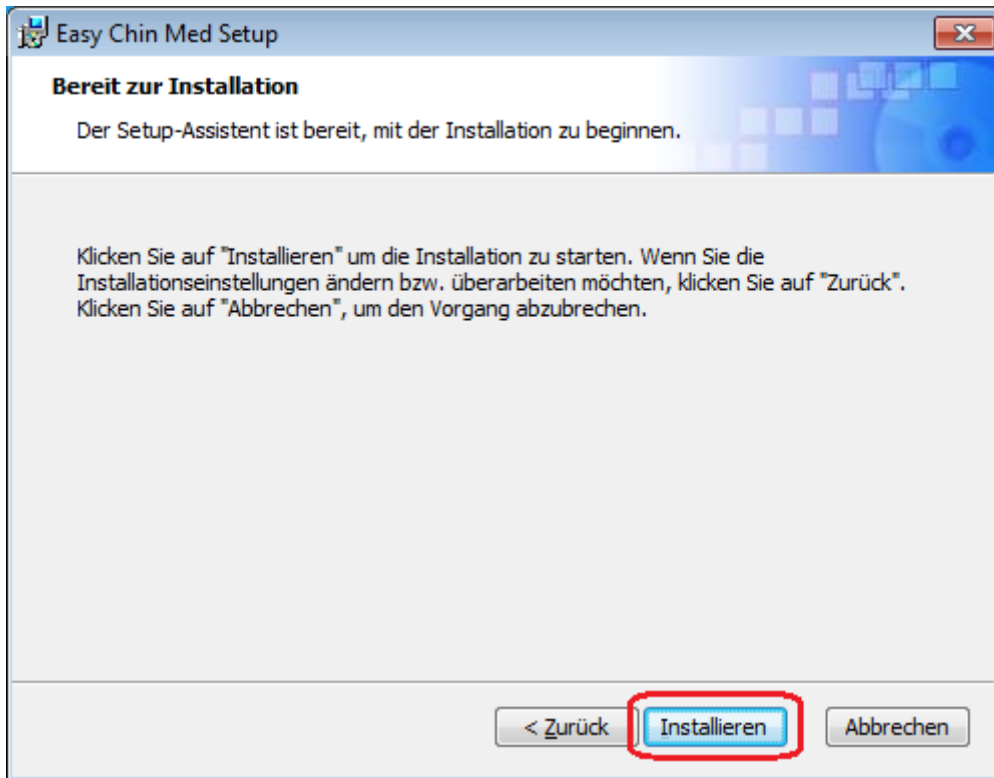


8) Nun wird das Programm installiert, bitte haben Sie etwas Geduld bis die Installation abgeschlossen wird.

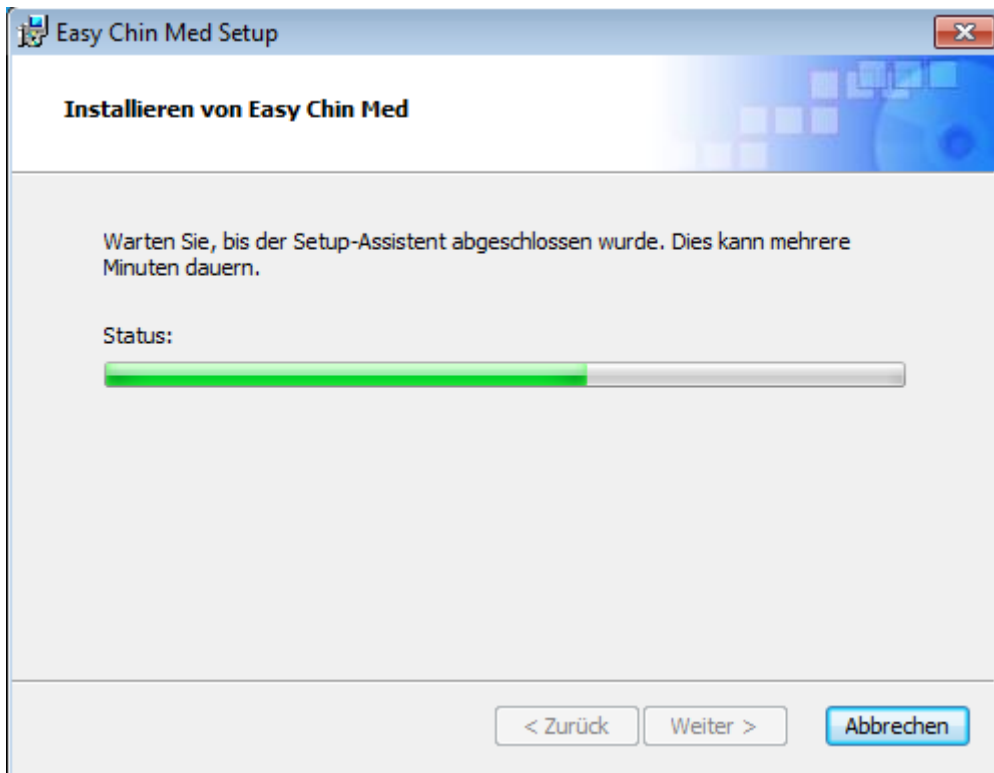


8a) Falls Sie kein Microsoft Office installiert haben, wird die Microsoft Office Access Runtime 2007 automatisch installiert:

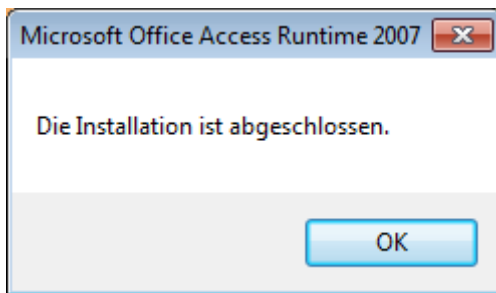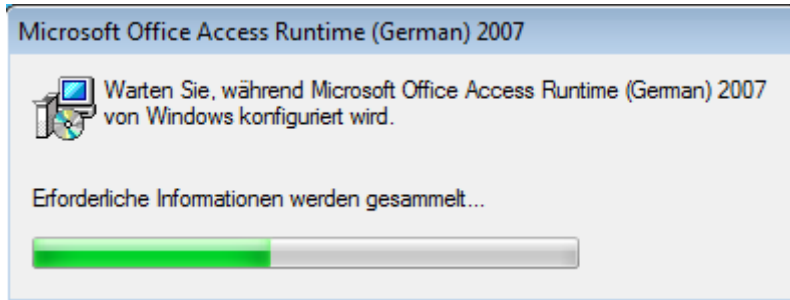

Wenn dieses Fenster angezeigt wird, heißt es, dass Sie die Microsoft Office Access Runtime 2007 erfolgreich installiert haben.

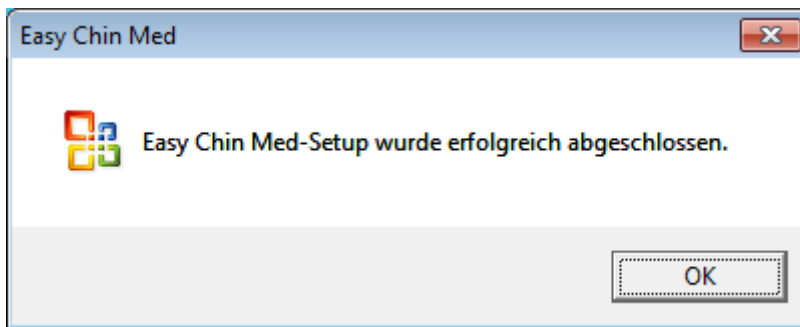

9) Erst jetzt, wurde die Software erfolgreich installiert und es wurde automatisch eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop erstellt:

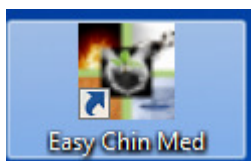

Wenn Sie nun die „Easy Chin Med“-Verknüpfung auf Ihrem Desktop doppelt anklicken, wird das Programm geladen und folgendes Fenster wird angezeigt:



Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die „Easy Chin Med“-Software unter Windows 7 erfolgreich installiert.

Falls Sie Probleme bei der Installation oder weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

pro bono @ PROVITA
Gesundheits- und Vorsorgezentrum

Kundratstraße 6
A-1100 Wien

telefonische Terminvereinbarung:
01 603 15 47
oder
0699 1966 06 21

E-Mail: info@probono.at